

Suction Easy™

Oral Suction Device



Einleitung

Suction Easy™ ist eine manuelle orale Absaugvorrichtung, zum Entfernen von Fremdkörpern im Mund- und Rachenbereich, welche ohne Zweifel zu den kritischen Störungen bei einer Basis-Wiederbelebungen gehören.

Suction Easy™ erleichtert nicht nur das Training, sondern bietet Retter auch eine der schnellsten, sichersten und effektivsten Form einer manuellen Absaugvorrichtung.

Anwendungsvorschriften des

Suction Easy™

- Nehmen Sie Suction Easy™ aus der Verpackung. Ziehen Sie den Saugschlauch heraus. Wenn der Schlauch völlig herausgezogen ist, spüren Sie einen Stop.
- Entfernen Sie mit ihren Finger alle sichtbaren Fremdkörper aus dem Mund des Patienten.
- Nehmen Sie die Saugpumpe zwischen Daumen und den Zeigefinger und drücken Sie sie zusammen.
- Platzieren Sie den Schlauch im Rachenraum des Patienten. Führen Sie den Saugschlauch nicht weiter ein, als Sie sehen können!
- Lassen Sie die Saugpumpe los, um Flüssigkeiten aus dem Rachen des Patienten zu entfernen.
- Fahren Sie fort, die Saugpumpe zusammendrücken und loszulassen, um zusätzliche Flüssigkeit zu entfernen.
- Nach Freimachen der Atemwege des Patienten kann es notwendig sein, andere Maßnahmen zu Ergreifen um die Atemwege frei zu halten.
- Entfernen Sie den Anweisungsaufkleber, um einen Bio-Gefahrgut Aufkleber frei zu legen. Um das Suction Easy™ korrekt zu entsorgen, geben Sie dieses in die verschließbare Tasche.

Entwicklung

- Das Birnen-Design bietet gleichmäßige Saugkraft an der Öffnung (9.5mm) des Saugschlauches.
- Suction Easy™ ist - unabhängig von der Handgröße - einfach anzuwenden Die Vorrichtung ist kompakt und effektiv, Fremdkörper im Rachen eines Patienten sind kein Hinderniss mehr für eine erfolgreiche CPR.
- Das Doppelventil System ermöglicht die Anwendung mit einer Hand, die andere Hand kann den Saugschlauch im Rachen des Patienten manövrieren. Die angesaugte Flüssigkeit wird in den Auffangbehälter mit ca 1000ml Volumen geleitet.
- Das System hat zwei Ventilklappen. Die erste am Ende des Saugschlauches innerhalb der Saugpumpe. Die zweite Ventilklappe ist an der Abflussöffnung innerhalb des Auffangbehälters sichtbar.
- Ein 2teiliger Aufkleber, auf dem verschließbaren Beutel jedes Suction Easy komplettiert das System.
- Das verwendete Suction Easy™ wird in den Lieferbeutel gelegt und verschlossen. Der Benutzer zieht die obere Schicht des Paketaufklebers ab, um das Bio-Gefahrgut Symbol freizumachen. Anforderungen an Infektions-Prävention und Kennzeichnung werden in einem einfachen Schritt erfüllt.
- Vertriebsgesellschaften, seine Angestellten oder seine Tochtergesellschaften sollten für Personenschäden oder Tod durch Gebrauch dieser Vorrichtung in keinsten Weise haftbar gemacht werden können. Das Suction Easy™ darf nur nach einem speziellen medizinischen Training verwendet werden!

Training (Für das Training kann das Suction Easy™ mit Wasser (mehrmals) verwendet werden)

Die Entlüftungsöffnung wird durch ein halbdurchlässiges Membran verschlossen. Die Funktion dieser Membrane wird so lang beibehalten bis Flüssigkeit gewaltsam durchgepresst wird z.B. auf den Beutel treten oder Abzusaugen wenn der Vorratsbeutel voll ist.

Sobald Flüssigkeiten durch das Membran gepresst wird, ist das Membran undicht bis es wieder trocken ist. Diese Eigenschaft kann für das persönliche Training im Gebrauch von Suction Easy™ nützlich sein.

Zu Trainingszwecken kann man sauberes Wasser aus einem Behälter saugen, um die Anwendung zu üben. Wasser kann durch die Entlüftungsöffnung heraus gelassen werden, um die Saugpumpe und den Sammelbeutel zu leeren. Durch Ansaugen von Luft trocknet das System schneller. Sobald das Membran der Entlüftungsöffnung vollständig trocken ist, gewinnt es seine halbdurchlässigen Eigenschaften wieder.

Einfacher Betrieb

Mehr oder weniger Sog erzielt man durch kräftige oder flache Kompressionen.

Die Gesamtkapazität des Suction Easy™ (Saugbirne und Auffangbehälter) ist ungefähr 1,000ml. Dieses Volumen kann man mit raschen, flachen Kompressionen der Pumpe schnell erreichen.



Schließen Sie den Reißverschluss des Beutels um das Suction Easy™ sicher zu entsorgen.



Ziehen Sie den Aufkleber ab, um es als Bio-Gefahrgut zu kennzeichnen

EIGENSCHAFTEN:

- KOMPAKT
- STABIL
- FUNKTIONAL
- LEICHT
- EINEM DOPPELTEN ZWECK DIENENDER
- AUFKLEBER
- EINWEG VENTIL

NUTZEN:

- LEICHTE PACKUNGEN
- FÜR TRAINING MEHRFACH
- VERWENDBAR
- EINFACHE ANWENDUNG
- GÜNSTIG
- EFFIZIENT
- EINWEGMATERIAL

PRODUKTBESCHREIBUNGEN:

- FLÜSSIGKEITS KAPAZITÄT 1000
- GEWICHT 210 GM
- VAKUUMKRAFT 100 MM HG

**Marketing Tactics, its employees, or its affiliates shall in no way be held liable for personal injury or death due to use of this device. Suction Easy™ should be used only following proper medical training.*

Distributed by Medical Sales Consultants, GmbH. Peter Jordan Strasse 81 2 3, A-1180 Wien, AUSTRIA
Contact dmcgirt@medicalsoci.com