

LP15
Einführung



SCAN ME

Libepak 15



LP15
Handbuch



SCAN ME

Kapnometrie und -graphie

Pulsoxymetrie

Blutdruckmanschette

EKG-Kabel

12-ABLEIT.

EKG starten

ÜBERTRAGEN

Übertragung der Daten starten

EREIGNIS
DOKUMENT.

Bericht drucken

DRUCKEN

Drucker starten/stoppen

EKG-Drucker

Elektrodenkabel

Schnellwahlrad



An Strom angeschlossen
Batterie vollständig geladen
Betriebsstörung

Ein-/Ausschalter

Energieniveau wählen im manuellen Modus
Defibrillator im manuellen Modus laden

Schock abgeben

Externer Schrittmacher

Stimulationsfunktion aktivieren
Stimulationsfrequenz erhöhen/reduzieren
Stimulationsstrom erhöhen/reduzieren
Stimulation vorübergehend pausieren

Metronom

AED Modus aktivieren

EKG-Ableitung/Amplitude auswählen

Synchronisationsmodus für elektrische Kardioversion starten

Blutdruckmessung starten

Alarmer aktivieren/unterdrücken

Zugriff auf optionale Funktionen



Zugriff auf benutzerdefinierte Ereignisse

Hell-/Dunkelmodus

Home Button



Der AED-Modus ist bei Patient:innen
erst ab 8 Jahren vorgesehen!

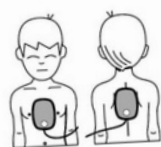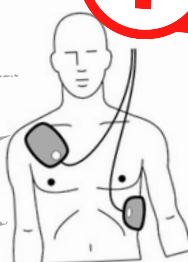

Medumat
Einführung



SCAN ME



Medumat Standard 2



Medumat
Handbuch



SCAN ME

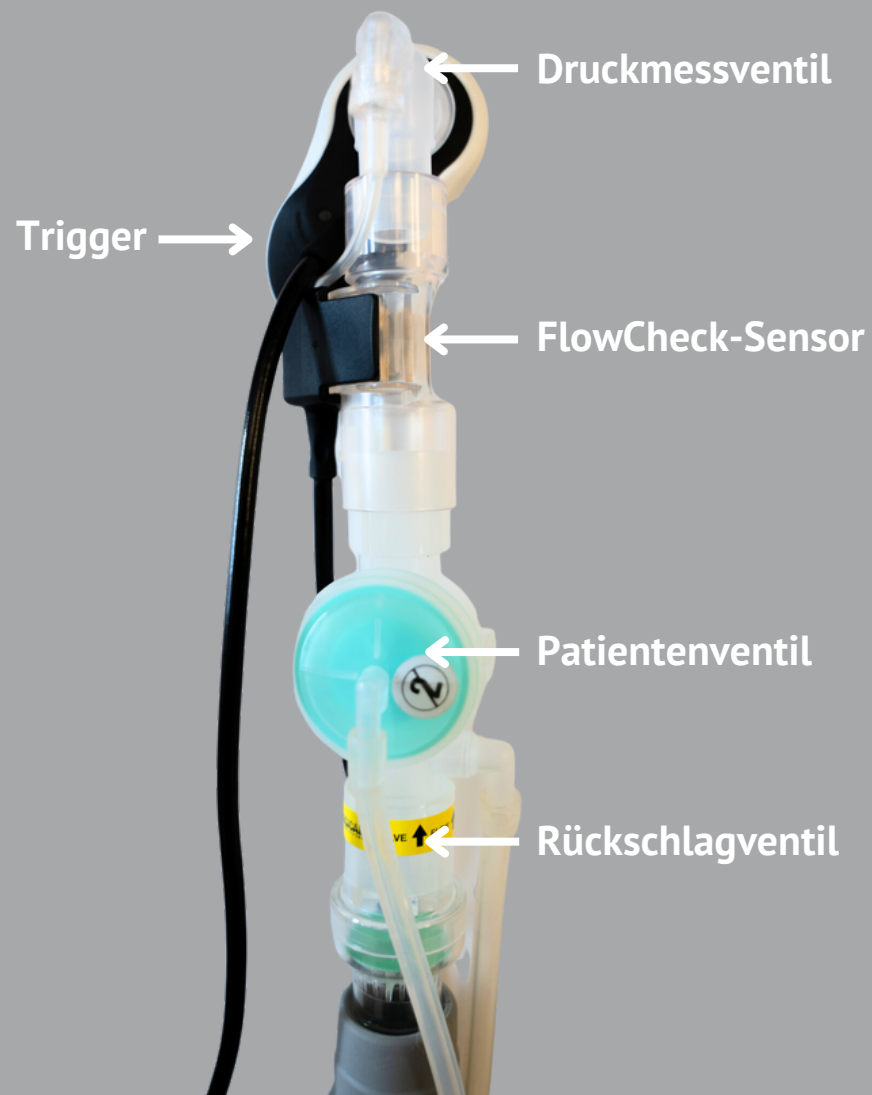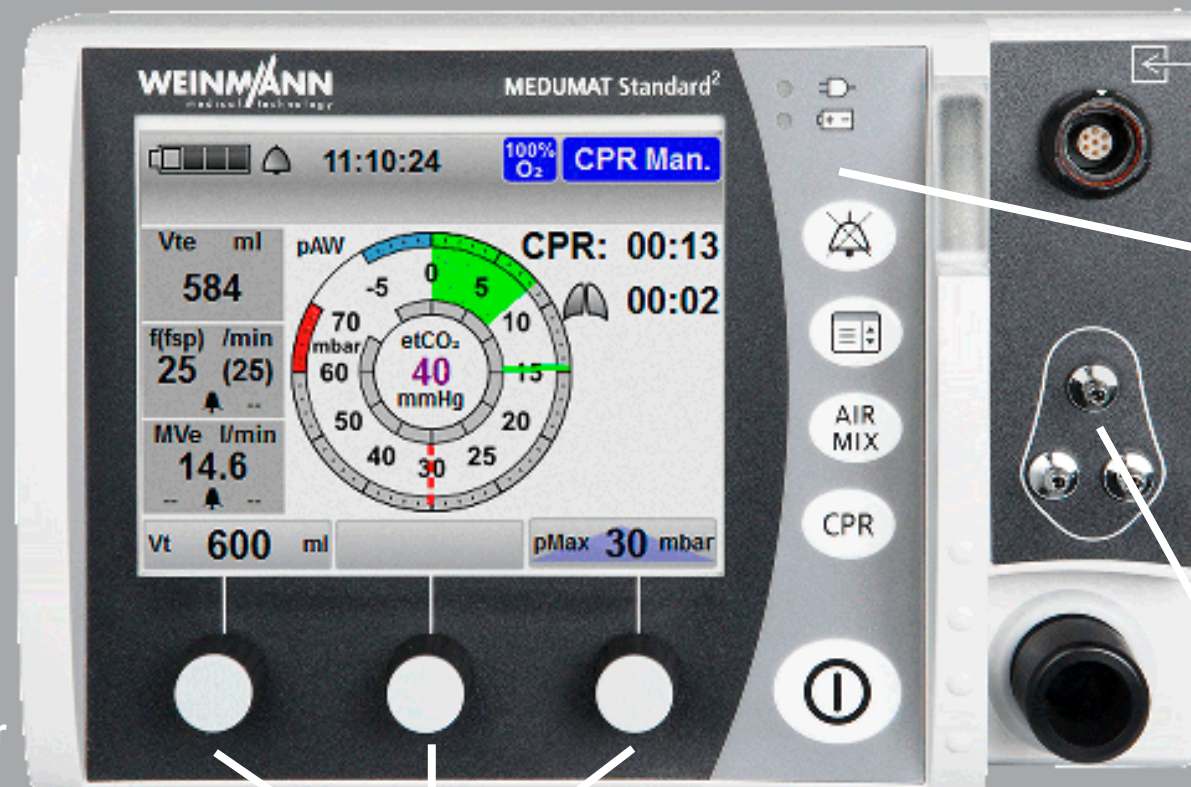

Bedienelemente



- Netzversorgung aktiv
- Akkustatus
- Alarme stummschalten
- Menü
- AIR MIX
- Umschalten zwischen Air Mix und No Air Mix
- CPR
- CPR-Modus
- Ein-/Ausschalter
- Zubehöranschluss
- Kombi-Anschluss: CO₂-Messschlauch
Druckmessschlauch
PEEP-Steuerschlauch
- Anschluss für Beatmungsschlauch



SAMARITERBUND
WIEN