

JOINSTAR (Spucktest, kein Abstrich erforderlich)

EN zertifiziert
25 Stück – pro Packung

Kurzbeschreibung

- Lagerung bei Zimmertemperatur: 2 - 30 °C (Haltbarkeit: 1 Jahr ab Produktionsdatum)
- **Besonders einfache Testdurchführung dank fertig bestückter Probenröhrchen**
- kann von ungeschultem Personal durchgeführt werden
- **Niedrigere Fehlerquote und verlässlichere Testergebnisse.** Das Testergebnis kann nach 10-15 Minuten abgelesen werden

Aufbewahrung

Der Test ist 12 Monate gültig, wenn alle Komponenten in dem versiegelten Beutel verpackt, vor Licht geschützt und bei 2°C – ~30°C korrekt gelagert werden. Nach dem Auffüllen der Reagenzienverpackung sollte der Test innerhalb einer Stunde durchgeführt werden. Das Herstellungs- und Verfallsdatum entnehmen Sie bitte der Verpackung des Produkts.

Hinweise

Der COVID-19 Antigen-Schnelltest (Latex) kann angewandt werden, um oropharyngealen posterior Speichel oder Sputum zu testen.

Der Test sollte unmittelbar nach der Probenentnahme durchgeführt werden. Lassen Sie die Probe nicht länger als 2 Stunden bei Raumtemperatur unbearbeitet. Die Proben können vor dem Testen bis zu 1 Monat bei -20°C gelagert werden.

Wenn Proben transportiert werden sollen, sollten sie gemäß der örtlichen Vorschrift für den Transport von ätiologischen Wirkstoffen verpackt werden.

Wenn Proben bei -20°C aufbewahrt werden, müssen sie vor der Prüfung aufgetaut, vollständig auf Raumtemperatur gebracht und durchgemischt werden. Die Proben können einmal eingefroren und aufgetaut werden. Wiederholtes Einfrieren und Auftauen sollte vermieden werden.

Probeentnahme

1. Speichel aus dem Rachenraum: Händehygiene mit Seife oder Handdesinfektion auf Wasser-/Alkoholbasis durchführen. Öffnen Sie den Behälter. Machen Sie einen „Kruuu“-Laut aus tiefster Kehle, um dort den Speichel zu lösen. Dann spucken Sie Speichel (etwa 2ml) in den Behälter. Vermeiden Sie jegliche Speichelverunreinigung der Außenfläche des Behälters. Optimaler Zeitpunkt der Probenentnahme: Nach dem Aufstehen und vor dem Zähneputzen, Essen oder Trinken.

2. Speichelprobe: Öffnen Sie das Probenextraktionsröhrchen und übertragen Sie etwa 200mg vom frischen Speichel aus dem Behälter in das Probenextraktionsröhrchen. Danach vollständig mischen.

3. Nehmen Sie die Testkassette aus dem Verpackungsbeutel. Legen Sie diese auf einen Tisch. Schneiden Sie den Vorsprung des Sammelröhrchens ab und geben Sie 3 Tropfen der Probe senkrecht in das Probenloch.

4. Lesen Sie das Ergebnis nach 15 Minuten ab. Wenn sie 20 Minuten oder länger ungelesen bleiben, sind die Ergebnisse ungültig. Ein Wiederholungstest wird empfohlen.

Ergebnis

Positiv (+):

Es erscheinen zwei farbige Linien. Eine farbige Linie sollte immer in dem Kontrollbereich (C) und eine weitere Linie in der T-Linien Region sein.

* HINWEIS: Die Intensität der Farbe in den Testlinienbereichen kann abhängig von der Konzentration von SARS -CoV-2 in der Probe variieren. Daher sollte jeder Farbton im Bereich der Testlinie als positiv angesehen und als solcher aufgezeichnet werden.

Negativ (-):

Eine farbige Linie erscheint im Kontrolllinienbereich (C). Im Bereich der T-Linie wird keine Linie angezeigt.

Ungültig:

Kontrollzeile wird nicht angezeigt. Unzureichendes Probenvolumen oder nicht ordnungsgemäße Verfahrenstechnik könnten Gründe für einen Fehler sein. Überprüfen Sie das Verfahren und wiederholen Sie den Test mit einem neuen Kit. Wenn das Problem weiterhin besteht, stellen Sie die Verwendung der Test Kits ein.

Die Tests ersetzen keinen durch medizinisches Personal durchgeführten PCR-Test!